

Vitrectomie



pour une convalescence plus confortable !

Mode d'emploi :

Kit Sommeil



© Gilles Bien-Être — www.vitrectomie.fr

Kit Sommeil



Mettez la tête sur son support et soulevez la poignée qui permet le maintien du Kit Sommeil, puis positionnez celui-ci dans un angle de 90° ainsi que l'angle de la tête

Vitrectomie

pour une convalescence plus confortable !



Sortez le Kit Sommeil de son emballage et déposez le sur une surface stable (table, lit, etc.)




Kit Sommeil

Vitrectomie

pour une convalescence plus confortable !



Vous pouvez régler la tête en desserrant les 2 vis sous celle ci, puis il de la faire glisser à la bonne hauteur.

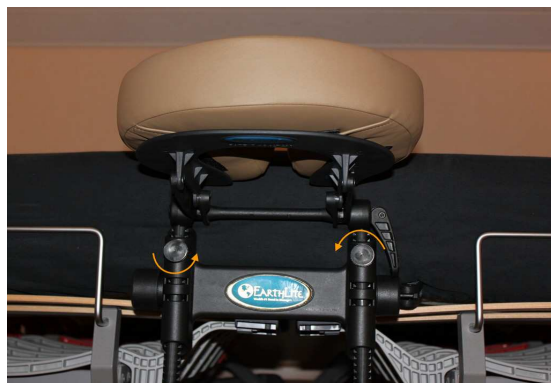

Kit Sommeil



Pour la mise en place il suffit de glisser l'arc de cercle entre le matelas et sommier

Vitrectomie

pour une convalescence plus confortable !



Son inclinaison est aussi possible en de desserrant la poignée situé en dessous à gauche.



Kit Sommeil

Vitrectomie

pour une convalescence plus confortable !

